

NikuTRAX

Bedienungsanleitung

Bedienung der Notrufuhren der NikuTRAX NC83-Serie

Version: 07.26



Inhaltsverzeichnis

1. SOS-Funktion	3
2. Bedienung per Touchscreen	3
3. Telefonieren	4
4. Vitalwerte messen (nur NC83S)	4
5. Menüpunkte	5
6. Einstellungen	6
7. Ortung der Uhr	7
8. Technische Spezifikationen	7
9. Reinigung und Pflege.....	8
10. Haftung und Gewährleistung	8
11. Kontakt.....	8



1. SOS-Funktion

Die **SOS-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses.**

So lösen Sie einen Notruf aus:

- SOS-Taste **mindestens 3 Sekunden gedrückt halten**
- Die Uhr ruft automatisch die **erste gespeicherte SOS-Nummer** an
- Wird der Anruf nicht angenommen, wählt die Uhr nach 20 Sekunden automatisch die nächste gespeicherte Nummer
- Es können **bis zu drei SOS-Nummern** hinterlegt werden
- Der aktuelle Standort wird automatisch an die hinterlegten Kontakte übermittelt

Hinweis:





Die SOS-Rufnummern werden in der App festgelegt.

2. Bedienung per Touchscreen

Die Uhr wird über den Touchscreen bedient.

Drücken Sie dazu **kurz die Power-/SOS-Taste auf der rechten Seite**, um das Display zu aktivieren.

Sobald das Display eingeschaltet ist:

- Nach rechts oder links Wischen → Menü öffnen
- Nach unten Wischen → Anzeige von:
 - Netzverbindung - 
 - GPS-Status - 
 - 4G-Verbindung - 4G^{HD} 
 - Akkustand - 
- Nach oben Wischen → Schrittzähler anzeigen

3. Telefonieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Anruf zu starten:

1. Über gespeicherte Kontakte

- Menü öffnen
- „Kontakte“ auswählen
- Gewünschten Kontakt auswählen
- Anrufsymbol antippen, um den Anruf zu starten

2. Über manuelle Rufnummerneingabe

- Menü öffnen
- „Telefon“ auswählen
- Rufnummer eingeben
- Anrufsymbol antippen, um den Anruf zu starten

Eingehende Anrufe können direkt über das Display angenommen oder abgelehnt werden.

4. Vitalwerte messen (nur NC83S)

- Menü öffnen → „Blutdruck“ oder „O₂“ auswählen
- Die Uhr ruhig am Handgelenk tragen
- Während der Messung stillhalten
- Die Messung dauert etwa 60 Sekunden
- Die Werte werden auf dem Display angezeigt und in die App übertragen

Alternativ lassen sich die Messungen auch direkt über die App starten. Die Ergebnisse werden anschließend automatisch mit der Uhr synchronisiert.

Wichtiger Hinweis:

Die Uhr dient zur Orientierung und ersetzt kein medizinisches Messgerät.

5. Menüpunkte

Schritte (GPS-Schrittzähler): Zeigt die Anzahl der zurückgelegten Schritte an. Die Berechnung erfolgt anhand der aufgezeichneten GPS-Strecke sowie der in der App hinterlegten Schrittlänge.

Hinweis: Wechselt die Ortung zwischen GPS, WLAN oder LBS, kann es zu Abweichungen in der Schrittanzeige kommen.

Kontakte: Hier sehen Sie die in der App gespeicherten Kontakte (maximal zehn) und können diese direkt anrufen.

Inaktivitätsbenachrichtigung: Ist diese Funktion aktiviert, meldet sich die Uhr, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine oder zu wenig Bewegung festgestellt wird.

Alarm: Hier werden die drei in der App eingestellten Weck- und Erinnerungszeiten angezeigt.

Stoppuhr: Mit dieser Funktion können Sie Zeit messen.

Telefon: Ermöglicht die manuelle Eingabe einer Rufnummer und das Starten eines Anrufs.

Chat: Hier können Sie Sprachnachrichten mit Familienmitgliedern austauschen, die ebenfalls die App verwenden.

Kamera: Mit dieser Funktion können Sie Fotos über die Uhr aufnehmen. Alternativ kann die Kamera auch über die App gestartet werden.

Galerie: Hier sehen Sie alle Fotos, die mit der Uhr aufgenommen wurden.

Anrufliste (call log): Zeigt alle eingehenden und ausgehenden Anrufe der vergangenen sieben Tage an.

QR-Code: Zeigt den automatisch generierten Registrierungscode (QR-Code) zur Kopplung der Uhr mit der App an.

Hinweis: Der QR-Code wird nur angezeigt, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und eine aktive Datenverbindung besteht.

Einstellungen: Über diesen Menüpunkt lassen sich verschiedene Einstellungen der Uhr ändern.

Videoanruf: Hier können Sie einen Videoanruf mit Personen starten, die ebenfalls die App nutzen.

Rechner: Mit dem Taschenrechner können einfache Rechenaufgaben direkt auf der Uhr durchgeführt werden.

6. Einstellungen

Galerie wählen: Hier können Sie ein Zifferblatt aus der Galerie auswählen.

Lautstärke: Hier können Sie die Lautstärke der Uhr anpassen.

Helligkeit: Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

SMS-Synchronisierung: Synchronisiert SMS zwischen Uhr und App.

Schlafzeit: Stellen Sie ein, wann sich das Display automatisch ausschaltet (15, 30 oder 60 Sekunden).

VoLTE: Hier können Sie die VoLTE-Funktion ein- oder ausschalten. VoLTE ermöglicht Telefonate in verbesserter Sprachqualität über das 4G-Netz.

Sprache: Hier stellen Sie die Sprache der Uhr ein.

Ausschalten: Zum Ausschalten der Uhr (Bestätigung erforderlich).

Informationen: Hier werden Informationen zur Uhr angezeigt, z. B. Modell, Firmware-Version und IMEI-Nummer.

7. Ortung der Uhr

Die Uhr nutzt drei Ortungstechnologien: **GPS, WLAN (Wi-Fi) und LBS**. Grundsätzlich wählt die Uhr automatisch die genaueste verfügbare Ortungsmethode, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

GPS (genaueste Ortung)

GPS funktioniert zuverlässig im Freien bei freier Sicht zum Himmel. Die Ortung beginnt, sobald mindestens vier Satelliten empfangen werden.

Nach etwa 2–3 Minuten unter freiem Himmel schaltet die Uhr vollständig in den GPS-Modus. Die Genauigkeit beträgt ca. 1–4 Meter.

WLAN (Wi-Fi – Ortung in Innenräumen)

In Gebäuden erfolgt die Ortung über WLAN.

Dabei werden öffentlich bekannte WLAN-Netzwerke in der Umgebung ausgewertet – ohne Anmeldung oder Passwort.

Es kann zu Abweichungen kommen, sodass ein Standort angezeigt wird, an dem man sich tatsächlich nicht aufgehalten hat.

Diese Abweichungen sind technisch bedingt.

LBS (Mobilfunkortung)

Sind weder GPS noch WLAN verfügbar, nutzt die Uhr LBS (Mobilfunkortung). Der Standort wird dabei über Mobilfunkmasten bestimmt. Diese Methode ist ungenauer und kann je nach Umgebung abweichen. LBS funktioniert nur, wenn die SIM-Karte im Mobilfunknetz eingebucht ist. Wird LBS in der App deaktiviert, können ohne GPS oder WLAN keine Standortdaten übertragen werden.

8. Technische Spezifikationen

Netz: 4G/LTE • SIM: Nano

Akku: 700 mAh, bis zu 6 Tage Standby

Abmessungen: 48 × 38 × 15* mm (*die NC83S ist 1 mm höher)

Armband: 22 mm • Wasserdicht nach IPX7 • Gewicht: 55 g

9. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.

Tragen Sie die Uhr nicht beim Schwimmen, Duschen oder bei anderen Wasseraktivitäten.

Obwohl die Uhr wasserabweisend ist, ist sie **nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet**.

Vermeiden Sie außerdem, im abgelegten Zustand starken Druck oder hohe mechanische Belastungen auf das Gehäuse auszuüben.

10. Haftung und Gewährleistung

Für Schäden durch unsachgemäße Installation, Nutzung oder Bedienung übernehmen wir keine Haftung.

Es gilt die gesetzliche Sachmängelgewährleistung von **2 Jahren**.

Das Öffnen des Geräts, Manipulationen, Reparaturversuche oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Hinweis zum Widerrufsrecht: *Das Tragen der Uhr ist nur zur Funktionsprüfung erlaubt. Bei längerer Nutzung besteht kein Widerrufsrecht mehr.*

11. Kontakt

NikuTRAX GmbH

Im Hülsen 13 • 33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de

Web: www.nikutrax.de • Shop: shop.nikutrax.de

YouTube: [@NikuTRAXcare](https://www.youtube.com/@NikuTRAXcare)

Hotline: [+49 5203 - 29 607 28](tel:+4952032960728)