

NikuTRAX


Handbuch

Notrufuhr NC96S GPS
Vitalfunktionen & Sturzsensor, Ein-Knopf
Version: 07.26



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Vorbereitung der SIM-Karte.....	3
3. SIM-Karte einsetzen und Uhr aktivieren.....	4
4. Download der Aibeile-Plus App.....	5
5. Registrierung in der App.....	6
6. Uhr per QR-Code mit der App verbinden.....	7
7. Zeitzone und SOS-Rufnummern einstellen.....	8
8. Bedienung und Funktionen der Uhr.....	9
9. Menüpunkte der App-Einstellungen.....	10
10. Menüpunkte der App-More.....	13
11. Reinigung und Pflege.....	16
12. Haftung und Gewährleistung.....	16
13. Kontakt.....	16

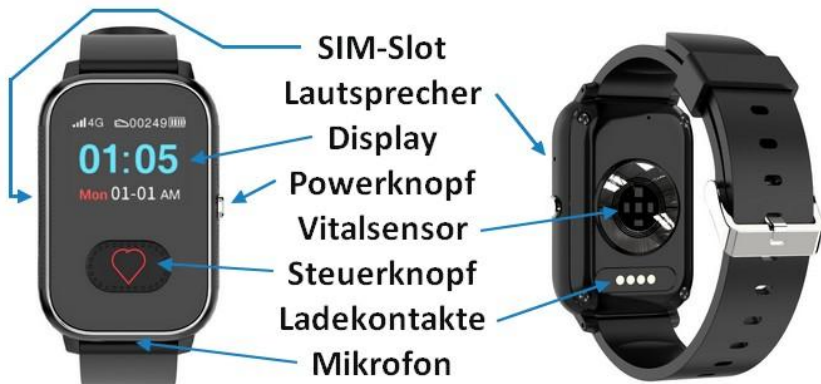

1. Einleitung

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, Ihre NikuTRAX Notrufuhr NC96S sicher und einfach in Betrieb zu nehmen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie die Uhr verwenden.

2. Vorbereitung der SIM-Karte

Bitte beachten Sie folgende Punkte



Nano-SIM

- Die SIM-Karte muss das **Nano-SIM-Format** haben.



PREPAID

- Es kann eine **Prepaid-SIM-Karte** verwendet werden.



- **Multi-SIM-Karten** sind nicht kompatibel.



REGISTRIERT

- Die SIM-Karte muss **registriert und freigeschaltet** sein.



- Es muss **ausreichend Guthaben** vorhanden sein.



250 MB

- **Mindestens 250 MB Datenvolumen** sind erforderlich.



- Die **PIN-Abfrage** der SIM-Karte muss vorab **deaktiviert** werden.

Bitte prüfen Sie diese Punkte vor der Inbetriebnahme, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

3. SIM-Karte einsetzen und Uhr aktivieren

1. Ziehen Sie den **SIM-Slot** auf der linken Seite der Uhr vorsichtig heraus und legen Sie die **SIM-Karte** ein.
Schieben Sie den SIM-Slot anschließend wieder in die Uhr und befestigen Sie ihn mit der **beiliegenden Schraube**.
War die Uhr zuvor eingeschaltet, führen Sie bitte einen **Neustart** durch.
2. Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie die **seitliche Taste ca. 3 Sekunden** gedrückt halten.
Es darf keine PIN-Abfrage erscheinen.
3. Rufen Sie die **Rufnummer der eingelegten SIM-Karte** an.
Die Uhr muss dabei klingeln.
4. Prüfen Sie auf dem Display, ob oben das **Symbol für die mobile Datenverbindung 4G^{HD} ↑↓** angezeigt wird.
5. Navigieren Sie durch **mehrmaliges kurzes Betätigen** des **Steuerknopfes** im Menü zum Punkt „**QR-Code**“.
Nun wird ein **QR-Code zur Kopplung mit der App** angezeigt.

Hinweis: Der QR-Code wird nur angezeigt, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, die Uhr ein 4G-Netz anzeigt und die mobile Datenverbindung aktiv ist.



4. Download der Aibeile-Plus App

Laden Sie die **Aibeile-Plus App** auf Ihr Smartphone herunter.

Scannen Sie dazu den **QR-Code** mit der Kamera Ihres Smartphones oder einem QR-Code-Scanner und installieren Sie anschließend die App.



iOS



Android

Alternativ können Sie die Aibeile-Plus App im App Store oder Google Play Store suchen und herunterladen.



NikuTRAX Control

Android-Nutzer können die aktuelle Version der NikuTRAX Control App auch direkt über unsere Website herunterladen:

nikutrax.de → Informationen → Downloads → Apps → NikuTRAX Control für Android

5. Registrierung in der App

Öffnen Sie die **Aibeile-Plus App** oder die **NikuTRAX Control App** und tippen Sie **rechts auf „Registrieren“**. Richten Sie nun **Ihre persönlichen Zugangsdaten** ein.

Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein und vergeben Sie ein **Passwort**.

Passwortregeln: Das Passwort muss **8 bis 16 Zeichen** lang sein und **Buchstaben sowie Zahlen** enthalten.

Vergessen Sie nicht, der Nutzervereinbarung und der Datenschutzerklärung zuzustimmen.

The image displays two screenshots from the NikuTRAX Control app during the registration process.

Left Screenshot (Login/Registration Screen):

- Title: NikuTRAX Control
- Email field: muster@nikutrax.de
- Password field:
- Link: Passwort vergessen?
- Button: **Registrieren** (highlighted with a red box)
- Checkbox: Auto-Login
- Button: EINLOGGEN
- Checkbox: Ich habe gelesen und stimme zu: Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung (highlighted with a red box)
- Language: Deutsch
- Region: Europa und Afrika

Right Screenshot (Confirmation Screen):

- Title: Registrierung
- Email field: muster@nikutrax.de
- Confirmation code field: S5NPDK (with a refresh icon)
- Password field:
- Button: BESTÄTIGEN SIE DIE REGISTRIERUNG
- Checkbox: Ich habe gelesen und stimme zu: Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung (highlighted with a red box)
- Language: Deutsch
- Region: Europa und Afrika

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie sich mit Ihren **Logindaten** in der Aibeile-Plus oder NikuTRAX Control App **anmelden**.

Wenn Sie noch **kein Gerät hinzugefügt** haben, fordert die App Sie automatisch auf, ein neues Gerät zu verbinden.

Wählen Sie **„Gerät hinzufügen“** und scannen Sie den **QR-Code Ihrer Uhr**.

Alternativ gelangen Sie über den Menüpunkt „Geräteliste“ zur gleichen Funktion.

6. Uhr per QR-Code mit der App verbinden

Nehmen Sie Ihre Uhr und rufen Sie den QR-Code für die Registrierung auf. Sobald der QR-Code vom Display der Uhr gescannt wurde, erscheint der Registrierungscode automatisch in der App. **Alternativ können Sie den Code auch manuell über die Tastatur eingeben.**

Nun können Sie Ihrer Uhr einen **persönlichen Gerätenamen** vergeben und einen **Avatar** auswählen. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „OK“.

In der App erscheint anschließend die Meldung „**Verbindung erfolgreich**“.

Ihre Uhr ist nun **erfolgreich mit der App verbunden** und bereit zur **Eingabe und Übermittlung der Einstellungen**.



← Scanner

7. Zeitzone und SOS-Rufnummern einstellen

1. Zeitzone einstellen

Stellen Sie die **Zeitzone der Uhr** in der App ein.



Tippen Sie dazu **oben rechts auf das Zahnrad** und wählen Sie „**Zeitzonenauswahl**“.

Wählen Sie **GMT +01** für die Winterzeit oder **GMT +02** für die Sommerzeit.

2. SOS-Rufnummern festlegen

Legen Sie **bis zu drei SOS-Rufnummern** in der App fest.

Gehen Sie dazu auf „**SOS / Familien-Rufnummern**“ und bestimmen Sie **die Rufreihenfolge**.

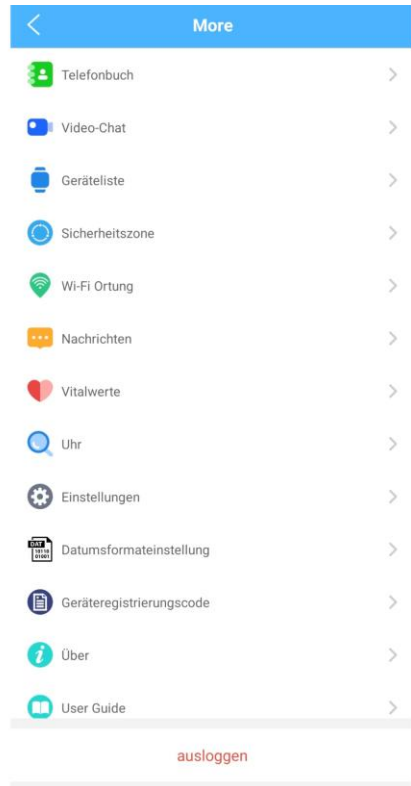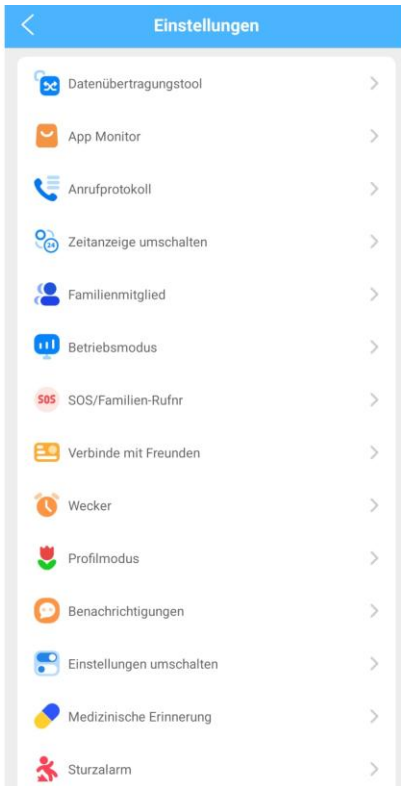

8. Bedienung und Funktionen der Uhr


Um einen **SOS-Ruf** auszulösen, halten Sie den **Steuerknopf** oder die **seitliche Taste länger als 3 Sekunden** gedrückt. Die Uhr wählt automatisch die **erste SOS-Rufnummer**, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Ist diese Rufnummer **20 Sekunden lang nicht erreichbar**, wählt die Uhr automatisch die **zweite SOS-Rufnummer** für 20 Sekunden und anschließend die **dritte SOS-Rufnummer** für 20 Sekunden. Dieser Ablauf wird **einmal wiederholt (1× Loop)**.

Weitere Funktionen der Uhr

Durch **kurzes Drücken** des **Steuerknopfes** können Sie die **Funktionen** Ihrer Notrufuhr durchgehen.

Wenn Sie zu den Menüpunkten „Blutdruck“, „Puls“ oder „Sauerstoffsättigung“ navigieren, startet die **jeweilige Messung automatisch**, sofern Sie **nicht weiter navigieren**.

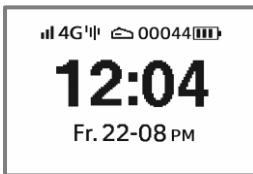


Uhrzeit/Datum



Schritte



Puls/Blutdruck

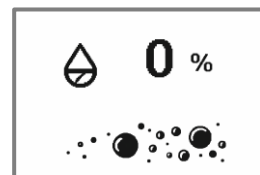

Sauerstoffsättigung

Uhr ausschalten

- **Ohne eingelegte SIM-Karte:**
Halten Sie die den Powerknopf ca. 3 Sekunden gedrückt.
- **Mit eingelegter SIM-Karte:**
Öffnen Sie in der App das Menü „Mehr“ und wählen Sie anschließend „Fernabschaltung“.



QR-Code

Uhr aufladen

Schließen Sie das **Ladekabel** an **einen USB-Netzadapter (1 A)** an und stecken Sie diesen in die Steckdose.

Verbinden Sie anschließend die **magnetischen Kontakte** auf der Rückseite der Uhr.

Die empfohlene Ladezeit beträgt **ca. 1 Stunde täglich**.


Die **Akkulaufzeit** liegt – je nach Nutzung – bei **48 bis 120 Stunden**.

Während **des Ladevorgangs ist das Display gesperrt**.

Achtung! *Akkulaufzeiten von **unter 24 Stunden** oder **Displaystörungen** sind in der Regel auf **Probleme mit der SIM-Karte** zurückzuführen.*

9. Menüpunkte der App-Einstellungen

In diesem Bereich werden die einzelnen Menüpunkte der App-Einstellungen kurz erklärt. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Menüpunkte angezeigt werden, da diese von der jeweiligen Version der Uhr abhängen.

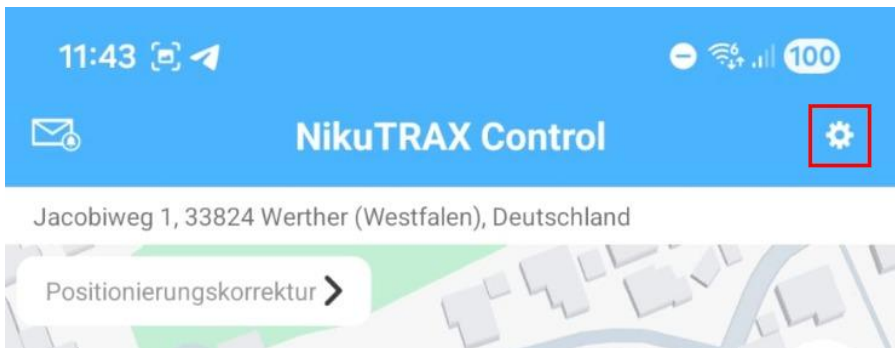

Eine **detaillierte Beschreibung aller Einstellungen und Funktionen** finden Sie in unserer App-Anwendungsanleitung unter:

nikutrax.de → **Informationen** → **Downloads** → **Apps** →

Anwendungsanleitung - NikuTRAX Control App / AIBEILE Plus

Datenübertragungstool: Überträgt die aktuellen Einstellungen auf eine neue Uhr, die mit der App verbunden wurde.

Anpassung der Gerätelautstärke: Hier passen Sie die Medien- und Anruflautstärke der Uhr an.

App Monitor: Geben Sie Funktionsmenüs der Uhr frei oder sperren Sie diese.

Anrufprotokoll: Zeigt alle eingegangenen und ausgehenden Anrufe an.

Zeitanzeige umschalten: Legen Sie das Zeitformat (12 h oder 24 h) fest.

Familienmitglied: Hier sehen Sie die Einstellungen, die Sie bei der Anmeldung vergeben haben.

Betriebsmodus: Sie können ein Tracking-Intervall von 10 Minuten, 1 Stunde oder eine manuelle Standortabfrage einstellen.

Bei einem 10-Minuten-Intervall beträgt die Akkulaufzeit ca. 48 Stunden.

SOS / Familien-Rufnr.: Legen Sie bis zu drei SOS-Rufnummern fest, die im Notfall nacheinander angerufen werden.

Verbinde mit Freunden: Ermöglicht die direkte Verbindung zwischen zwei Uhren (für Notrufuhren in der Regel nicht relevant).

Nutzungseinschränkung: Legen Sie bis zu vier Zeiträume fest, in denen die Uhr gesperrt ist und nur Notrufe möglich sind.

Sie können Kontakte auswählen, die die Uhr in diesem Modus weiterhin anrufen oder per Video kontaktieren dürfen.

Wecker: Legen Sie bis zu drei Weckzeiten für beliebige Wochentage fest.

Profilmodus: Stellen Sie ein, ob die Uhr klingeln und/oder vibrieren soll.

Benachrichtigungen: Geben Sie eine Telefonnummer an, die im SOS-Alarmfall oder bei niedrigem Akkustand eine Status-SMS erhält.

Einstellung umschalten: Sperren Sie die Wähltastatur, sodass nur Anrufe aus dem Telefonbuch möglich sind.

Medizinische Erinnerungen: Stellen Sie individuelle Erinnerungen (z. B. für Medikamente) mit optionaler Sprachausgabe und Textmeldung ein.

Sturzalarm: Aktivieren Sie den Sturzalarm über den oberen Schalter. Optional können Sie die SOS-Anrufkette mit Sprechverbindung nach einem Sturz aktivieren.

Stellen Sie außerdem die Empfindlichkeit der Sturzerkennung ein: Kleiner Wert = hohe Empfindlichkeit / Großer Wert = geringere Empfindlichkeit.

SMS-Nachrichten: Zeigt alle an die Uhr gesendeten SMS an. Der SMS-Empfang auf der Uhr kann gesperrt werden – die Nachrichten werden dann nur in der App angezeigt.

Unbekannte Anrufe ablehnen: Begrenzt eingehende Anrufe auf Rufnummern, die im Telefonbuch der Uhr gespeichert sind.

Automatische Antwort: Anrufe von Nummern aus dem Telefonbuch werden nach 10 Sekunden Klingeln automatisch angenommen.

Zeitzonenauswahl: Wählen Sie die Zeitzone aus (z. B. GMT +1 für Deutschland).

Sprachwahl: Wählen Sie die Sprache der Uhr.

LBS: Ortung über Mobilfunkzellen.

Aktivieren Sie LBS, damit bei fehlendem GPS- oder WLAN-Signal weiterhin eine Standortbestimmung möglich ist.

Gerät abrufen: Fragen Sie den letzten Standort der Uhr ab, spielen Sie einen Signalton ab, sperren Sie die Uhr aus der Ferne oder hinterlegen Sie einen Hinweistext für den Finder.

Zeit synchronisieren: Synchronisieren Sie Uhrzeit und Zeitzone der Uhr mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Gerät zurücksetzen: Setzen Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück.

Remote-Neustart: Starten Sie die Uhr aus der Ferne neu, z. B. nach grundlegenden Einstellungsänderungen.

10. Menüpunkte der App-More

In diesem Bereich werden die einzelnen Menüpunkte der App-More kurz erklärt. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Menüpunkte angezeigt werden, da diese von der jeweiligen Version der Uhr abhängen.



Telefonbuch: Es können bis zu zehn Kontakte gespeichert werden. Diese werden im Nutzereinschränkungs-/Demenzmodus oder bei aktivierter Funktion „Unbekannte Anrufe ablehnen“ verwendet. Nur gespeicherte Kontakte können die Uhr anrufen.

Geräteliste: Zeigt alle Geräte (Uhren), die mit Ihrer App verbunden sind.

Sie können weitere Geräte hinzufügen oder bestehende entfernen.

Sicherheitszone (Geofence): Legen Sie einen Bereich fest, um benachrichtigt zu werden, wenn dieser betreten oder verlassen wird.
Tippen Sie auf das Plus-Symbol und wählen Sie den gewünschten Bereich auf der Karte aus.

Wi-Fi-Ortung: Innerhalb von Gebäuden nutzt die Uhr WLAN oder LBS zur Positionsbestimmung.

Dabei werden umliegende WLAN-Netzwerke zur Standortermittlung herangezogen – ohne Anmeldung oder Passwort.

Als Referenz kann z. B. ein öffentlich registrierter Router in der Nähe dienen.

Nachrichten: Über das Briefsymbol oben links in der App gelangen Sie zu allen Alarmmeldungen.

Angezeigt werden SOS-Alarme, Sturzalarme, Sicherheitszonen-Alarme und Batteriewarnungen der Uhr.

Vitalwerte / Schrittzähler: Hier sehen Sie Ihre Vitaldaten und können eine Fernmessung auslösen (nur bei S-Modellen verfügbar).

GPS-Schrittzähler: Geben Sie Ihre Schrittlänge und Ihr Gewicht ein und aktivieren Sie den Schrittzähler.

Uhr / Gerät suchen: Lassen Sie die Uhr klingeln, um sie leichter wiederzufinden.

Einstellungen: Wechselt zurück zum Hauptmenü der Einstellungen.

Datumsformat: Stellen Sie das Datumsformat der App ein (z. B. TT-MM-JJJJ).

Geräteregistrierungscode: Zeigt den Registrierungscode der Uhr an. Dieser kann zur Weitergabe kopiert werden.

Über: Anzeige der installierten App-Version.

Fernabschaltung: Die Uhr wird ausgeschaltet und kann nur direkt an der Uhr wieder eingeschaltet werden.


Persönliche Daten: Bearbeiten und anzeigen Ihres Avatars sowie Ihrer persönlichen Daten.

Passwort ändern: Ändern Sie hier Ihr App-Passwort.

Konto löschen (Logout): Löscht Ihren Account vollständig.

⚠ *Alle gespeicherten Daten gehen dabei verloren.*

Ausloggen: Melden Sie sich aus der App ab (Account bleibt erhalten).

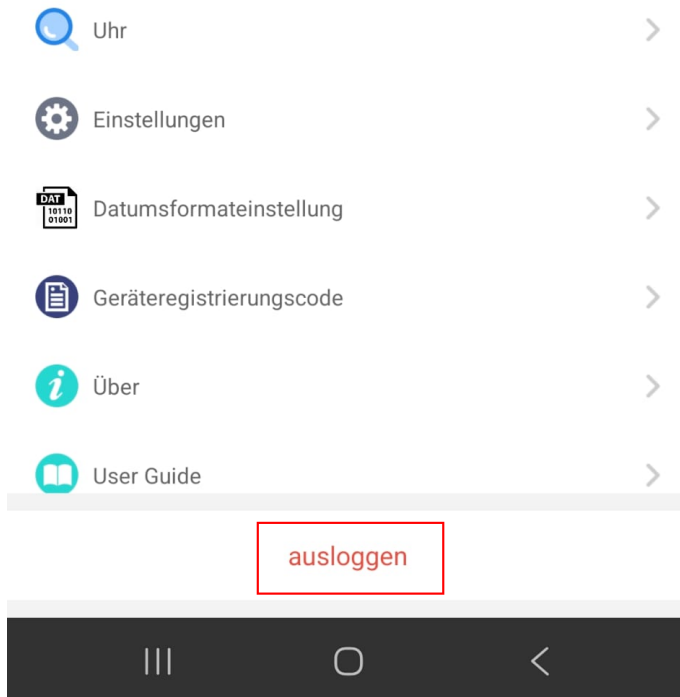

11. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.

Die Uhr ist gemäß IP68 staub- und wasserdicht und somit gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt. **Sie ist jedoch nicht für Aktivitäten wie Schwimmen, Tauchen oder den Einsatz unter Wasser vorgesehen.**

Vermeiden Sie außerdem, im abgelegten Zustand starken Druck oder hohe mechanische Belastungen auf das Gehäuse auszuüben.

12. Haftung und Gewährleistung

Für Schäden durch unsachgemäße Installation, Nutzung oder Bedienung übernehmen wir keine Haftung.

Es gilt die gesetzliche Sachmängelgewährleistung von **2 Jahren**.

Das Öffnen des Geräts, Manipulationen, Reparaturversuche oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Hinweis zum Widerrufsrecht: *Das Tragen der Uhr ist nur zur Funktionsprüfung erlaubt. Bei längerer Nutzung besteht kein Widerrufsrecht mehr.*

13. Kontakt

NikuTRAX GmbH

Im Hülsen 13 • 33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de

Web: www.nikutrax.de • Shop: shop.nikutrax.de

YouTube: [@NikuTRAXcare](https://www.youtube.com/@NikuTRAXcare)

Hotline: [+49 5203 - 29 607 28](tel:+4952032960728)